


VISIÈRE FACIALE PLIABLE

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

👉 Lavez-vous les mains avant le montage 👉


Cliquez la 1ère languette

1

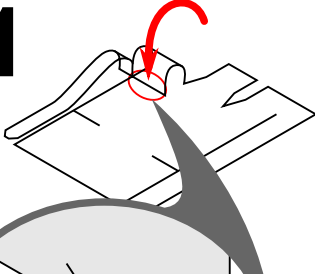


Cliquez la 2nde languette

2

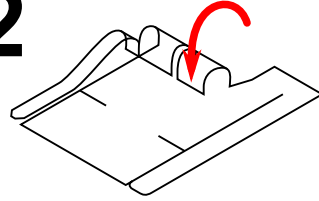


Cliquez la 3ème languette

3

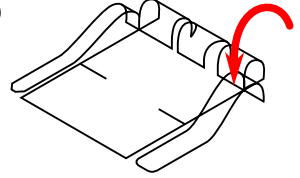


Pliez à gauche

4

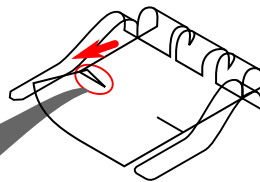



Pliez à droite

5

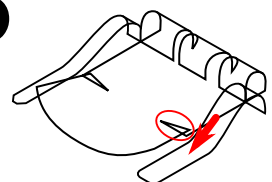


Fixez la sangle


6

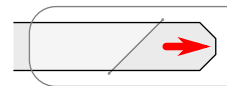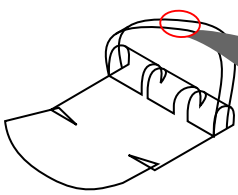

a) Insérez la petite sangle dans la fente

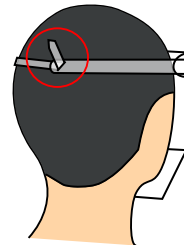


b) Réglez la longueur sur votre tête

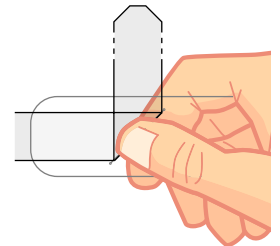


c) Marquez le pli

NB: Methode alternative (si vous n'êtes pas un marin) : Mettez un morceau de scotch

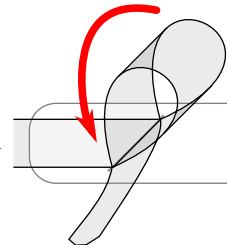

d) Repassez la sangle dans la fente

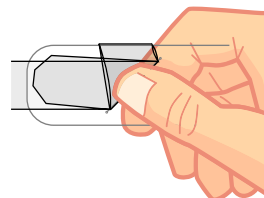

e) Pincez pour sécuriser

NB: le bout de la petite sangle doit être à l'horizontale

Et voilà !



Ne convient pas à la protection chimique des liquides ou des vapeurs.
Portez des protections complémentaires si nécessaire.

Visières faciales pliables – Notice d'utilisation

Informations importantes

- Les visières sont à utiliser *en complément des gestes barrières*.
- Ces visières sont personnelles et ne doivent en aucun cas être utilisées par plusieurs personnes, même après décontamination.
- Si vous, ou une personne avec qui vous avez été en contact, présentez des symptômes (fièvre, fatigue, toux sèche, etc.) la visière doit être jetée dans une poubelle immédiatement après utilisation.
- Si vous ne présentez pas de symptôme, les visières peuvent être nettoyées pour réutilisation. Les visières doivent être nettoyées après chaque journée d'utilisation, au minimum.

Avant de monter la visière

- Lavez-vous les mains
- Marquez votre nom au marqueur sur la sangle ou dans un coin

Desinfection pour réutilisation

Deux méthodes sont possibles :

1. **Par chauffage.** Passez les visières au four ou à l'étuve pendant 30 minutes à 70°C. La chaleur tournante peut être utilisée. Ne pas dépasser 100°C, ne pas utiliser la fonction grill. Le micro-onde n'a pas d'effet décontaminant suffisant.
2. **Par voie chimique.** Portez des gants de protection adéquats. Nettoyez consciencieusement les faces intérieures et extérieures des visières ainsi que les boucles frontales et la sangle avec un chiffon doux ou un sopalin imprégné d'un des produits ci-dessous, puis rincez à l'eau claire :
 - Eau savonneuse
 - Ethanol, isopropanol ou solution hydroalcoolique
 - Eau de javel (dilution 250mL par litre d'eau froide)

Produits non efficaces : vinaigre.